

Rollator Flex

Brugsanvisning



BLIMO
HJÆLPEMIDDEL

Produktoversigt



Forklaring af rollatordele:

1. Rygstøtte

2. Taske i mesh (net)

3. Forhjulslås

4. Forhjul

5. Baghjulslås

6. Baghjul

7. Knap til indstilling af højde

8. Foldbart sæde

9. Bremsehåndtag

10. Håndtag/armlæn

I papkassen:

Rollator Flex

Brugsanvisning

Taske i mesh (net)

Monteringsvejledning

Trin 1: Montering af forhjul

Hold den røde knap inde, som vist på billedet. Sæt derefter hjulet deri.

Når hjulet klikker i, så sidder det ordentlig fast.



Trin 2: Fold baghjulene ned

Skub den røde knap ned for at låse baghjulsets ben op. Fold benet ned.

Skub derefter den røde knap tilbage. Et klik høres når den er låst fast igen.

Tjek hjul og ben efter, om de sidder korrekt.



Trin 3: Monter sæde

Fold rollatoren ud. Tryk på sædekantene indtil et klik høres.

Sørg for at sædet er korrekt fastgjort.



Trin 4: Monter taske

Monter tasken på sædet som vist på billedet.



Juster højde på håndtag/armlæn


Tryk på den lille knap markeret på billedet for at justere håndtaget/armlænet til en passende højde.

Sørg for at begge sider er indstillet i den samme højde.



Bremsning af rollatoren

Tryk begge bremsehåndtag ind for at standse rollatoren.

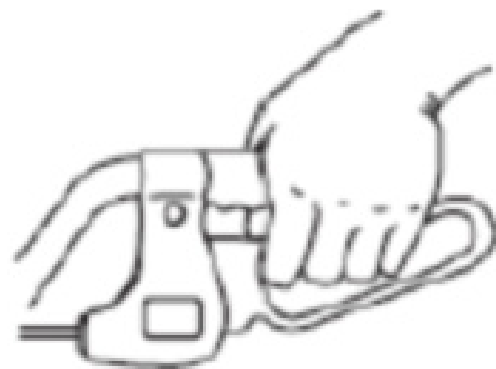

Parkering af rollator

Tryk begge bremsehåndtag udad til de klikker i for at parkere rollator.

Tryk dem indad igen for neutral position for at fjerne parkeringsfunktion.


Bemærk! Slå altid parkeringsfunktionen til inden du sidder dig på rollatoren.



Sammenfoldning af rollatoren

Træk i håndtaget på sædet for at folde rollatoren sammen.

Hvis rollatoren skal sættes til opbevaring, skal du udføre trin 1-3 i omvendt rækkefølge.

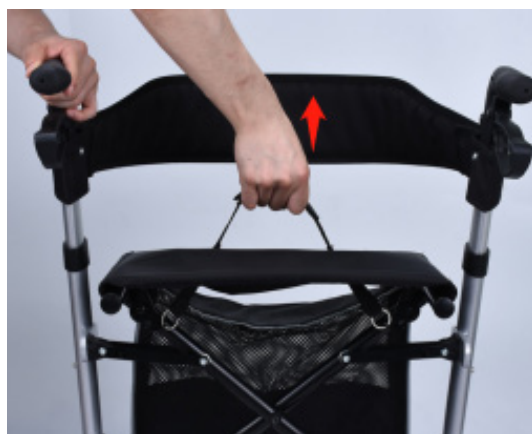

Kontaktoplysninger

Blimo

Nordbutiker i Sverige AB

Gösvägen 28

76141Norrtälje

SWEDEN

Tel: +45 89 87 30 84

E-mail: info@blimo.dk

Org. 556908-9385

CVR.nr: 38385739

BLIMO
HJÆLPEMIDDEL